

VESSIE À GLACE



Description

Cette vessie à glace, dotée d'un revêtement tissu, assure une transmission efficace du froid

Utilisation

Permet de décongestionner ou de calmer la douleur de manière efficace en cas d'hématome, d'entorse, de foulure etc...

Mode d'emploi

Il suffit de remplir à moitié la vessie à glace, puis de bien refermer le bouchon. Contrôler ensuite son étanchéité en la renversant, puis appliquer la vessie sur la zone à soulager, en l'entourant d'un linge pour qu'elle ne soit pas en contact direct avec la peau.

Nettoyage

Elle est stérilisable à l'oxyde d'éthylène et se nettoie à l'eau savonneuse ou au détergent n'attaquant pas le caoutchouc, le PVC et le nylon.

Dimension

28 cm